

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Капли глазные RELINS® увлажнение ACTIVE с гиалуроновой кислотой 0,41%



Назначение: Капли глазные RELINS® увлажнение ACTIVE с гиалуроновой кислотой 0,41 % (далее – капли RELINS®) предназначены для применения в качестве профилактического офтальмологического средства для высокоэффективного продолжительного увлажнения, предотвращения потери естественной слезной жидкости и снижения симптомов сухости глаз, в том числе при синдроме «сухого глаза».

Описание:

Капли RELINS® представляют собой бесцветную или желтоватую прозрачную жидкость без посторонних включений.

Состав:

Стерильный изотонический боратный буферный раствор, который содержит гиалуроновую кислоту (0,41 %), ЭДТА динатриевую соль дигидрат, поверхностно-активные вещества (не более 0,00023%).

СТЕРИЛЬНО. Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.

Показания к применению:

Капли RELINS® показаны к применению в качестве профилактического средства с целью дополнительного увлажнения (роговицы, конъюнктивы, слезной пленки) при ощущении в глазах:

- ▷ сухости,
- ▷ раздражения,
- ▷ зуда,
- ▷ жжения,
- ▷ покраснения,
- ▷ дискомфорта,
- ▷ песка или инородного тела,
- ▷ затуманенности,
- ▷ стянутости и слпания,
- ▷ усталости.

Капли RELINS® поддерживают увлажнение глаз в течение дня при использовании их по мере необходимости.

Вышеуказанные ощущения могут наблюдаться в следующих случаях:

- ▷ пониженный объем слезоточивости либо повышенное испарение влаги с поверхности глаз;
- ▷ ношение контактных линз;
- ▷ гормональные колебания у женщин (в ожидании ребенка, во время кормления его грудью, а также во время менструации, менопаузы и пост-менопаузы);
- ▷ старение (синдром «сухого глаза» наблюдается чаще всего у женщин после 40 лет, после 60 лет – приблизительно 75 % людей);
- ▷ воздействие климатических факторов (ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, загрязненный воздух и т.п.);
- ▷ воздействие внешних факторов при использовании кондиционеров и обогревателей, а также при работе в помещениях с сухим воздухом, в пыльных или дымных (включая сигаретный дым) зонах, при работе с химикатами и т.п.;
- ▷ длительное управление автотранспортом;
- ▷ продолжительная работа за компьютером или просмотр телевизора;
- ▷ работа мастеров бьюти-индустрии, ювелира, или иное кропотливое занятие, связанное с большой нагрузкой на зрение и необходимостью концентрации;

- ▷ механическое повреждение глаз или последствия оперативного вмешательства;
- ▷ прием некоторых лекарственных препаратов, таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бета-блокаторы, спазмолитики, и т.д.;
- ▷ перенесенные инфекционно-воспалительные и иные заболевания глаз;
- ▷ различные заболевания, такие как ревматоидный артрит, диабет, проблемы щитовидной железы и т.п.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам капель. Аллергическая реакция на какой-либо компонент капель.

Побочные действия:

Побочные эффекты не обнаружены.

Область применения:

Капли RELINS® предназначены для применения в профилактических целях в домашних условиях, а также для использования в лечебно-профилактических учреждениях для высокоэффективного увлажнения глаз за счет поддержания увлажняющих и защитных свойств.

⚠ Предостережения:

Детям до 14 лет перед применением капель RELINS® рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Данные об опыте применения капель RELINS® женщинами в период беременности и лактации отсутствуют; назначение возможно только после консультации с врачом. Не используйте капли RELINS® при наблюдении неприятных ощущений в глазах в течение 15 минут после закапывания; при сохранении неприятных ощущений после прекращения использования обратитесь к врачу-офтальмологу.

Не применяйте капли RELINS® при одновременном приеме терапевтических офтальмологических препаратов, при воспалительных процессах и острых фазах заболеваний глаз.

При одновременном использовании с другими глазными каплями (средствами ухода) проконсультируйтесь с врачом.

Капли RELINS® не оказывают отрицательное влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (например, управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.). Непосредственно после закапывания капель RELINS® возможно «затуманивание» зрения, в этом случае следует дождаться распределения капель RELINS® по поверхности глаза и стабилизации зрения.

Используйте капли RELINS® до даты истечения срока годности, указанной на коробке и флаконе. Не используйте капли RELINS® по истечении 90 дней после вскрытия флакона.

Храните в недоступном для детей месте.

Принцип действия:

Капли RELINS® – это профилактическое средство со специально разработанным вязким составом. За счет высокой вязкости капли RELINS® обеспечивают более дли-

тельное сохранение гиалуроновой кислоты на поверхности глаза, в результате чего продлевается увлажняющий и защитный эффект от использования капель RELINS®. Гиалуроновая кислота, входящая в состав капель RELINS®, является природным биополимером, который обладает одной из самых высоких способностей связывать и удерживать молекулы воды, что делает капли RELINS® эффективным увлажняющим офтальмологическим средством, которое способствует снижению симптомов сухости и снятию раздражения глаз. Также гиалуроновая кислота является природным полимером (или полисахаридом), который содержится в тканях глаза, поэтому не нарушает естественных обменных и биологических процессов в период применения капель. В составе капель RELINS® используется высокомолекулярная гиалуроновая кислота в концентрации 0,41%, крупные молекулы которой формируют в растворе подобие сети, удерживающей воду и защищающей глаза от негативных воздействий.

Указания по применению:



1. Рекомендуется использовать капли RELINS® по мере необходимости в течение дня по 1-2 капли в каждый глаз.



2. Капли RELINS® закапывайте в чистые глаза, **без контактных линз** и, по возможности, без макияжа.



3. Перед использованием капель RELINS® тщательно вымойте руки с мылом.



4. Снимите защитный колпачок с флакона и не касайтесь открытого кончика вставки-капельницы флакона.



5. Запрокиньте голову, оттяните нижнее веко вниз, посмотрите вверх, и в промежутке, образовавшийся между веком и глазным яблоком (в *середину конъюнктивной полости*), закапайте 1-2 капли RELINS®.



6. Моргните несколько раз и медленно закройте глаза, чтобы капли RELINS® равномерно распределились по всей поверхности глаза.



7. В течение 15 минут не применяйте другие офтальмологические средства.

Условия использования:

В течение 15 минут после закапывания не применяйте другие офтальмологические средства и не надевайте контактные линзы.

Капли RELINS® могут применяться в течение 90 дней после вскрытия флакона. Капли RELINS® являются изделием индивидуального применения, не допускается использование капель RELINS® из одного флакона несколькими лицами.

Условия хранения:

Храните капли RELINS® в плотно закрытом флаконе в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +1 до +25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 °С).

Условия транспортирования:

Капли RELINS® транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для данного вида транспорта на территории перевозки в диапазоне температур, соответствующим условиям хранения.

Утилизация:

Капли RELINS® с истекшим сроком годности утилизируются путем разбавления водопроводной водой в десятикратном (1:10) размере и сливании в общую канализационную систему. Упаковка (*первичная и потребительская*) утилизируются как бытовые отходы.

Срок годности:

Срок годности капель RELINS® 2 (два) года с даты изготовления.

Условия отпуска:

Без рецепта врача.

Дезинфекция и очистка.

Капли RELINS® поставляются стерильными и не требуют дополнительной дезинфекции или обработки.

Гарантии производителя:

Производитель гарантирует соответствие продукции технологическим инструкциям предприятия, а также сохранение свойств капель 2 (два) года с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. По вопросам, связанным с применением капель RELINS®, обращайтесь к производителю.

Форма выпуска:

Капли RELINS® в полимерных флаконах номинальным объемом 5 мл, 10 мл, 15 мл в потребительской упаковке с инструкцией по применению, размещенной на листке-вкладыше.

Производитель:

ООО «Доктор Клаус»
223053, Республика Беларусь,
Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 27, к. 4, ком. 616;

Произведено:

Республика Беларусь,
Минская обл.,
Минский р-н, д. Лесковка,
ул. Совхозная, д. 4-1.
сайт: <https://doctorklus.by/>
e-mail: info@doctorklus.by
тел./факс: +375 17 51 139 51

Страна производства: Республика Беларусь

Расшифровка символов и обозначений, используемых при маркировке:

- Температура хранения от +1 до +25 °С.
- Не использовать продукт, если упаковка повреждена или вскрыта (*нарушена целостность защитного колпачка крышки*).
- Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Продукт стерилизован методом мембранной фильтрации.
- В 1 мл продукта около 25 капель.
- Не использовать продукт по истечении 3 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Производитель.
- Номер партии.
- Дата производства.
- Дата окончания срока годности.